


一次性使用
结扎装置

由输送器和结扎环组成

Disposable Ligation Device

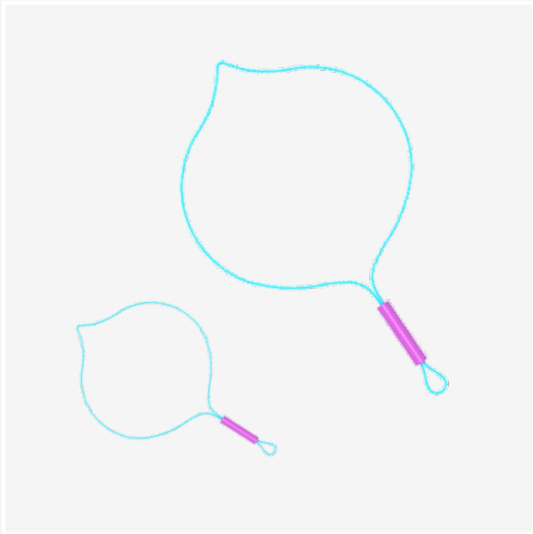

一次性使用结扎装置

Disposable Ligation Device

适用范围: 本产品在手术中的内窥镜下操作, 放入结扎环, 控制或者防止有蒂息肉切除后出血。

适用科室: 消化道内镜科、手术室。

产品特点:

- 配置灵活: 结扎环1-3个, 可根据临床需求灵活选择
- 可视性更佳: 套管颜色增强, 提升了内镜下的可视性, 操作更精准
- 通过性更优: min牵引钩, 内镜小弯下操作更加顺畅
- 适配性更广: 全系型号, 满足多种临床需求

操作步骤 >>>

将结扎环套与牵引钩上, 推动导入鞘手柄使结扎环收入导入鞘内, 再插入内镜工作通道



在内镜监视下, 将结扎环送至预定位置, 拉动导入鞘手柄使结扎环露出



将结扎环套扎息肉根部, 拉动手柄拉手收紧结扎环, 直至息肉呈紫色



完成套扎后, 推动手柄拉手, 使结扎环的拉环露出弹簧管, 牵引钩和结扎环分离撤出输送器

主要规格型号表

结扎环开幅	输送器工作长度	结扎环数量	管鞘外径
15mm	1650mm 1950mm 2300mm	1pcs	2.55mm
20mm		2pcs	
30mm		3pcs	
40mm			

